



## PODRUČJA PRIMJENE DETACHOL-a

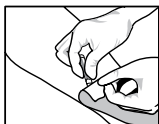

**UKLANJANJE  
PREKRIVKI  
VENSKIH  
KATETERA**



**UKLANJANJE  
PREKRIVKI  
POSTAVLJENIH  
VAKUMOM**

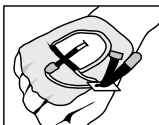

**UKLANJANJE  
PREKRIVKI KOD  
INTRAVENSKJE  
TERAPIJE**

### DETACHOL MOŽE UKLONITI:

- OSTATKE LJEPILA
- UKLANJANJE PREKRIVKI ENDOTRAHEALNIH TUBUSA
- UKLANJANJE PREKRIVKI NAZOGASTRIČNIH SONDI
- UKLANJANJE FIKSATORA S KATETERA

Ovlašteni predstavnik za Europu:

**FERNDALE LABORATORIES s.r.l.**

Sjedište: Pian dei Mori – Via Piave, 6 int. 1 – 53018 Sovicille (Siena) - Italia

Tel. 0577 349 207 – Fax 0577 349 386 – E-mail: [ferndalelabs@virgilio.it](mailto:ferndalelabs@virgilio.it)

C.C.I.A.A. Siena br.97849 – Sud Siena br. 9770 – Kapital Euro 41.316,52 i.v.

Porezni broj/PDV i matični broj 00881410526

Detachol je robna marka registrirana od strane Ferndale IP, Inc.

DE04 R4/12

# detachol®

PROIZVOD ZA UKLANJANJE LJEPILA


Koristi se kada postoji potreba za  
brzim, sigurnim, potpunim i  
bezbolnim uklanjanjem ljepila.




Detachol je proizvod za uklanjanje ljepila koji ne nadražuje kožu, a koristi se kao pomoć pri uklanjanju ljepljivih prekrivki i traka te ostataka ljepila s kože.

# detachol®

PROIZVOD ZA UKLANJANJE LJEPILA

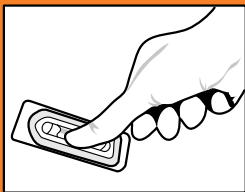

1 RAZBITI

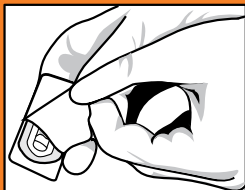

2 IZVADITI



3 APLICIRATI

## TRI JEDNOSTAVNA KORAKA ZA BEZBOLNO UKLANJANJE LJEPILA

Bočicu u pojedinačnom pakiranju postavite na tvrdu površinu (s naljepnicom usmjerenom prema dolje) te lagano pritisnite kako bi razbili unutarnju ampulu.

Uklonite foliju s pakiranja i izvadite bočicu koristeći se sterilnim, antiseptičkim tehnikama.

Laganim stiskanjem bočice nanosite Detachol na kut ljepljive trake ili prekrivke. Nakon što je kut natopljen, pažljivim povlačenjem počnite podizati prekrivku ili traku. Nastavite s nanošenjem Detachol-a daljnjim stiskanjem bočice dok istovremeno nježno povlačite traku ili prekrivku do njihova potpunog uklanjanja. Očistite područje blagim sapunom i vodom. Izbjegavajte kontakt s oštećenom kožom.

**Upozorenje:** Samo za vanjsku upotrebu.

**Sadržaj:** Posebno rafinirani proizvod na bazi parafinskog ugljikovodika.

**Pažnja:** Zapaljivo. Držati dalje od dohvata djece. Ako se proguta, ne izazivati povraćanje i odmah zatražiti liječničku pomoć.